

novofine® Autocover® 30G

0,3×8 mm

Introduktion

Læs denne brugervejledning omhyggeligt inden du bruger NovoFine® Autocover®, også selv om du har brugt NovoFine® nåle før.

Brug ikke nålen uden at have fået grundig instruktion af din læge eller sygeplejerske.

NovoFine® Autocover® er en steril injektionsnål med en automatisk sikkerheds-lås, der nedsætter risikoen for utilsigtede nålestik. Beskyttelseshætten på NovoFine® Autocover® skjuler nålen, så den ikke kan ses, når den bruges. Sikkerhedslåsen indikerer, at nålen har været brugt. Nålen er steril, når papirforseglingen og nålehætten er intakte. Nålene er KUN beregnet til ENGANGSBRUG.

NovoFine® Autocover® anbefales ikke til blinde eller svagtseende uden hjælp fra en person med normalt syn, der er instrueret i at bruge den.

⚠️ Vigtig information


Vær særligt opmærksom på denne information, da den er vigtig for at kunne anvende nålen sikkert.

⚠️ Opbevar små dele utilgængeligt for børn.




1 Påsætning af NovoFine® Autocover®

- Tag en ny NovoFine® Autocover® nål.
- Kontrollér papirforseglingen og nålehætten for skader som kan have indflydelse på steriliteten. Hvis NovoFine® Autocover® er beskadiget skal en ny tages i brug.
- Riv papirforseglingen af.
- Skub nålen direkte på pennen. Skru indtil den sidder godt fast.

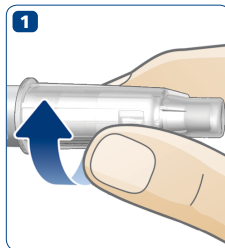

2 Tag nålehætten af

- Træk nålehætten af og gem den.

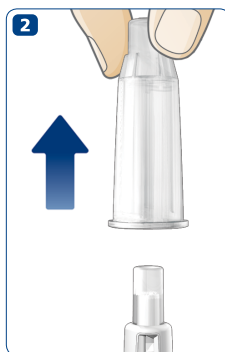

3 Kontrol af gennemløb (klargøring)

Kontrollér altid gennemløbet af dispenseringsystemet. Dette hjælper dig med at sikre, at du får hele din dosis. Følg instruktionen beskrevet i brugervejledningen til dispenseringsystemet.



⚠️ Sørg for at nålen ikke er låst inden injektion: Nålen er låst og kan ikke bruges, hvis sikkerhedslåsindikatoren er rød (se trin 5). Fjern nålen (se trin 6) og sæt en ny nål på.

4 Injektion


- Indstil den dosis du har brug for, som beskrevet i brugervejledningen, der følger med dispenseringsystemet.
- Stik nålen ind i huden. Følg den injektionsteknik, du er blevet instrueret i af sundhedspersonalet. For at sikre en mere fast overflade på injektionsstedet, kan du tage fat i en hudfold.
- Injicér lægemidlet, som beskrevet i brugervejledningen til dispenseringsystemet. **Hold NovoFine® Autocover® presset mod huden**, som vist på figur 4, for at sikre at nålen forbliver helt under huden under injektionen.
- Lad nålen forblive helt under huden og **tæl langsomt til 6**. Dette vil sikre, at du får den fulde dosis.
- Fjern nålen fra huden. Nogle få dråber af lægemidlet kan komme til syne på huden. Dette er lægemiddel, som samler sig i beskyttelseshætten i forbindelse med kontrol af gennemløbet. Det har ingen indflydelse på den dosis, der indgives.



⚠️ Lad nålen forblive helt under huden under injektionen, for at sikre at du får den fulde dosis. **Til insulinbrugere:** hvis den fulde dosis ikke er blevet indgivet, kan det medføre et for højt blodsukterniveau.

5 Sikkerhedslås

Når nålen fjernes fra huden aktiveres sikkerhedslåsen, og sikkerhedslåsens indikator bliver rød. Den røde sikkerhedslås-indikator angiver, at nålen er blevet låst, og dermed ikke kan genanvendes. Den røde sikkerhedslås-indikator **siger ikke noget om**, hvorvidt din dosis er blevet indgivet.

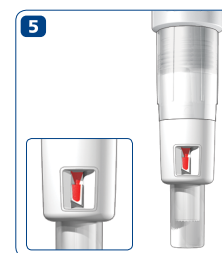

6 Afmontering af nålen

- Efter injektionen sættes nålehætten på igen og nålen skrues af.
- Kassér nålen sikkert som instrueret af sundhedspersonalet.

Kan bruges med: FlexPen®, FlexTouch®, InnoLet®, NovoPen®, NovoPen Echo®, Ozempic®, Saxenda®, Victoza®, Xultophy® (© tilhørende Novo Nordisk A/S). FlexPro®, Norditropin® Nordiflex®, Nordipen® (© tilhørende Novo Nordisk Health Care AG). AutoPen®, BerliPen®, Byetta Pen®, ClikStar®, HumaPen®, KwikPen®, SoloStar®, TactiPen® (© tilhørende deres respektive ejere).

NovoFine® og Autocover® er varemærker ejet af Novo Nordisk A/S, Danmark

Til forbrugere i Europa: Hvis din læge og/eller du mener, at du har oplevet en alvorlig hændelse forårsaget ved anvendelse af NovoFine® Autocover®, bedes du rapportere dette til Novo Nordisk og til din nationale myndighed.

Udgivelsesdato: 2019-05



novonordisk.com

© 2019

Novo Nordisk A/S

Novo Allé,

DK-2880 Bagsværd, Danmark

