

Einleitung

Diese Packung enthält eine FlexPro® PenMate® automatische Einstichhilfe, eine Box zur Aufbewahrung und diese Bedienungsanleitung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren FlexPro® PenMate® (im Folgenden PenMate® genannt) verwenden. Die Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Verwendung, Aufbewahrung und Reinigung Ihres PenMate® und Sie sollten diese Bedienungsanleitung auch dann lesen, wenn Sie bereits andere Novo Nordisk Injektionssysteme benutzt haben.

PenMate® soll Ihnen dabei helfen Wachstumshormon zu injizieren, indem die Nadel während der Injektion mit Norditropin® FlexPro® 5, 10 oder 15 mg/1,5 ml und Sogroya® 5, 10 oder 15 mg/1,5 ml Fertigpens verborgen wird.

Norditropin® FlexPro® und Sogroya® sind Fertigpens mit Wachstumshormon, die ausschließlich zum Gebrauch durch einen einzelnen Patienten bestimmt sind.

Norditropin® FlexPro® und Sogroya® sind zur Verwendung mit NovoFine® oder NovoTwist® Einweg-Injektionsnadeln bis zu einer Länge von 8 mm vorgesehen. Verwenden Sie Ihren Pen oder PenMate® nicht ohne Schulung durch Ihren Arzt oder medizinisches Fachpersonal. Lesen Sie die Norditropin® FlexPro® 5, 10 oder 15 mg/1,5 ml oder Sogroya® 5, 10 oder 15 mg/1,5 ml Bedienungsanleitung, bevor Sie den PenMate® verwenden.

Die Abbildungen in dieser Gebrauchsanweisung zeigen PenMate® im Gebrauch mit Norditropin® FlexPro® 5 mg/1,5 ml.

Wichtige Informationen und zusätzliche Informationen sind deutlich durch die folgenden Symbole hervorgehoben:


Wichtige Informationen

⚠ Legen Sie besonderes Augenmerk auf diese Hinweise, da sie wichtig für den sicheren Gebrauch Ihres Pens oder PenMate® sind.


Zusätzliche Informationen

ℹ Hilfreiche Informationen, wenn sie Ihren Pen und PenMate® verwenden.


FlexPro® PenMate®

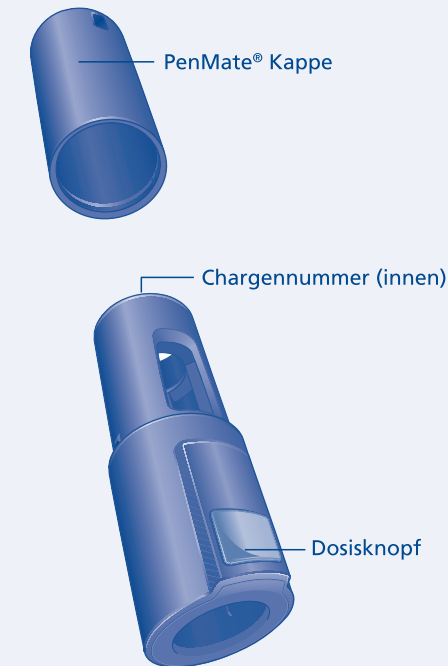

Norditropin® FlexPro® 5 mg/1,5 ml (Beispiel)

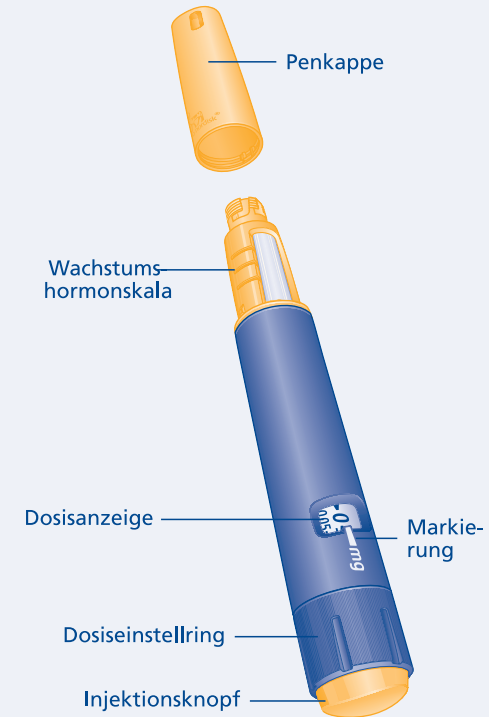

Nadel (Beispiel)

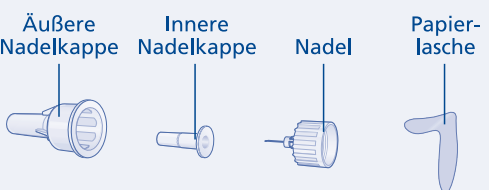

⚠ Wichtige Informationen

Lesen Sie diese wichtigen Informationen, bevor Sie mit der Verwendung Ihres PenMate® beginnen.

- PenMate® sollte nur in Kombination mit Norditropin® FlexPro® 5, 10 oder 15 mg/1,5 ml oder Sogroya® 5, 10 oder 15 mg/1,5 ml verwendet werden.
- Wenn Ihr PenMate® verloren geht oder beschädigt wird, können Sie Ihren Norditropin® FlexPro® und Sogroya® Pen auch ohne PenMate® verwenden.
- PenMate® ist ausschließlich zum Gebrauch durch einen einzelnen Patienten bestimmt. Teilen Sie Ihren Pen, PenMate® oder Ihre Nadeln niemals mit anderen Personen. Dies kann zu Kreuzinfektionen führen.
- Bewahren Sie Ihren Pen, PenMate® und Ihre Nadeln immer für andere, insbesondere Kinder, unzugänglich auf.
- Pflegepersonal muss beim Umgang mit benutzten Nadeln äußerst vorsichtig sein, um das Risiko für Nadelstichverletzungen und Kreuzinfektionen zu verringern.

Pen-Tabelle


Verwenden Sie die unten stehende Tabelle, um einen schnellen Überblick über alle Norditropin® FlexPro® und Sogroya® Pens sowie deren Unterschiede bezüglich Stärke des Wachstumshormons, Farbe, kleinstmögliche und größtmögliche Dosis zu erhalten.

Norditropin®	Sogroya®	Stärke	Min. Dosis	Max. Dosis
		5 mg	0 - 0,05 - 10	1,95 - 2
		10 mg	0 - 0,1 - 0,2	3,9 - 4
		15 mg	0 - 0,2 - 0,4	7,8 - 8


Vorbereiten Ihres PenMate®

Bevor Sie Ihren PenMate® vorbereiten, prüfen Sie immer den Namen, die Stärke und das farbige Etikett Ihres Norditropin® FlexPro® oder Sogroya® Pens, um sicherzustellen, dass er die Wachstumshormon-Stärke enthält, die Sie benötigen.

A Ziehen Sie die PenMate® Kappe ab.

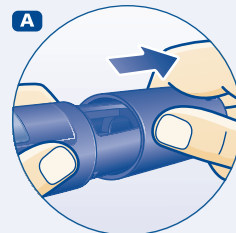

B Ziehen Sie die Penkappe ab. Sie benötigen sie während des Gebrauchs mit PenMate® nicht.

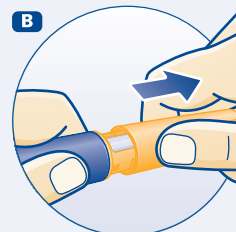


Prüfen Sie, dass die Wachstumshormonlösung im Pen klar und farblos ist, indem Sie den Pen ein- bis zweimal auf und ab schwenken. Falls die Lösung nicht klar oder trüb erscheint, darf der Pen nicht verwendet werden.

Vorbereiten Ihres PenMate®


C Setzen Sie den Pen in den PenMate® ein und drehen Sie den Pen bis Sie ein Klicken hören oder fühlen. Die Dosisanzeige des Pens wird auf gleicher Höhe mit dem Dosisknopf an Ihrem PenMate® sein.




D Nehmen Sie eine neue Einweg-Injektionsnadel und ziehen Sie die Papierlasche ab.

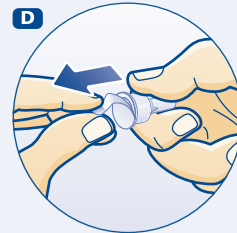


E Halten Sie den Pen fest und schrauben Sie die Nadel gerade auf den Pen. Vergewissern Sie sich, dass die Nadel fest sitzt.

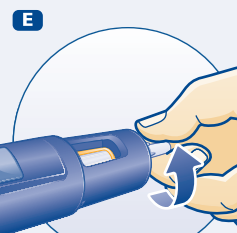

F Ziehen Sie die äußere Nadelkappe ab und bewahren Sie sie auf. Nach der Injektion werden Sie diese benötigen, um die Nadel korrekt vom Pen zu entfernen.

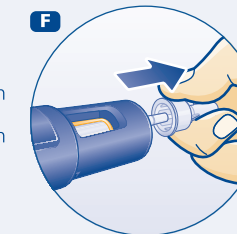

G Ziehen Sie die innere Nadelkappe ab und entsorgen Sie diese. Wenn Sie versuchen diese wieder aufzusetzen, dann könnten Sie sich versehentlich mit der Nadel stechen.

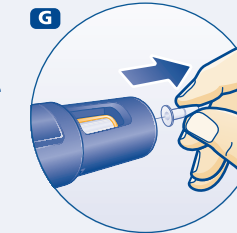

Ein Tropfen Wachstumshormon kann an der Nadelspitze erscheinen. Dies ist normal.

⚠ Die Nadel wird von 2 Kappen bedeckt. Sie müssen beide Kappen entfernen. Falls Sie vergessen, beide Kappen zu entfernen, werden Sie kein Wachstumshormon injizieren.

⚠ Verwenden Sie immer eine neue Nadel für jede Injektion. Dies reduziert das Risiko von Verunreinigungen, Infektionen, Auslaufen von Wachstumshormon, blockierten Nadeln und ungenauer Dosierung.

⚠ Entsorgen Sie eine verbogene oder beschädigte Nadel immer.

Überprüfen des Wachstumshormonflusses bei jedem neuen Pen

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre volle Dosis erhalten, indem Sie den Wachstumshormonfluss vor dem Einstellen und Injizieren der ersten Dosis bei jedem neuen Pen prüfen.


H Stellen Sie mit dem Dosisinstellung die kleinstmögliche Dosis von 0,025; 0,05 oder 0,1 mg ein, je nachdem, welchen Pen Sie verwenden. Siehe Pen-Tabelle.



I Halten Sie PenMate® mit der Nadel nach oben. Klopfen Sie ein paar Mal gegen das obere Ende des PenMate®, damit eventuell im Pen vorhandene Luftblasen nach oben steigen.



J Drücken Sie den Injektionsknopf, bis in der Dosisanzeige die Zahl 0 an der Markierung steht und ein Tropfen Wachstumshormon an der Nadelspitze erscheint. Wenn kein Tropfen erscheint, wiederholen Sie die Schritte H bis J bis zu 6-mal. Wenn nach diesen zusätzlichen Versuchen kein Tropfen erscheint, wechseln Sie die Nadel und wiederholen Sie die Schritte H bis J noch einmal.

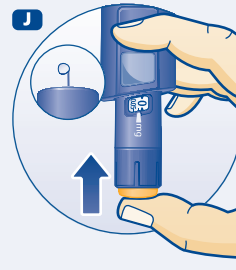

Verwenden Sie den Pen nicht, wenn dann immer noch kein Tropfen Wachstumshormon erscheint.

⚠ Vergewissern Sie sich immer, dass vor der Injektion Ihrer ersten Dosis bei jedem neuen Pen ein Tropfen an der Nadelspitze erscheint.

Einstellen Ihrer Dosis

Verwenden Sie den Dosisinstellung Ihres Norditropin® FlexPro® oder Sogroya® Pens, um bis zu 2,0; 4,0 oder 8,0 mg pro Dosis einzustellen, je nachdem, welchen Pen Sie verwenden.

K Stellen Sie sicher, dass in der Dosisanzeige die Zahl 0 an der Markierung steht. Wählen oder korrigieren Sie die benötigte Dosis durch Vor- oder Zurückdrehen des Dosisinstellrings, bis die richtige Anzahl an mg an der Markierung angezeigt wird.



Wenn der Pen weniger als die größtmögliche Dosis (2,0; 4,0 oder 8,0 mg, je nachdem, welchen Pen Sie verwenden) enthält, stoppt der Dosisinstellung bei der mg-Menge, die noch im Pen vorhanden ist.

ℹ Das Klicken des Dosisinstellrings hört sich unterschiedlich an, je nachdem, ob er vorwärts, rückwärts oder über die noch im Pen vorhandene mg-Menge hinaus gedreht wird.

⚠ Verwenden Sie niemals die Anzahl der Klicks, um zu zählen, wie viel mg Sie einstellen. Die exakte mg-Menge wird nur an der Markierung in der Dosisanzeige angezeigt.

⚠ Verwenden Sie niemals die Wachstumshormonskala, um die Menge des zu injizierenden Wachstumshormons zu bestimmen. Die exakte mg-Menge wird nur an der Markierung in der Dosisanzeige angezeigt.

Aktivieren Ihres PenMate®

Verwenden Sie Ihren PenMate®, um die Nadel automatisch in Ihre Haut zu stechen.

L Um Ihren PenMate® zu aktivieren, nehmen Sie PenMate® und den Pen in die Hand ohne die Nadel, den Dosisknopf oder den Injektionsknopf zu berühren.

Halten Sie Ihren PenMate® fest und ziehen Sie den Pen heraus bis Sie anhand eines Klickens hören und fühlen, dass er richtig sitzt.

Die Injektionsnadel wird nun von Ihrem PenMate® verdeckt.



FlexPro®, Norditropin® und Sogroya® sind eingetragene Marken der Novo Nordisk Health Care AG, Schweiz. PenMate®, NovoFine® und NovoTwist® sind eingetragene Marken der Novo Nordisk A/S, Dänemark.

Erscheinungsdatum: 2022/03
© 2023
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Dänemark

Vertrieb:
Novo Nordisk Pharma GmbH
DC Tower, Donau-City-Straße 7
1220 Wien
Tel. Nr.: 01/405 15 01 - 0
Kundenservice: 0800 008 009
E-Mail-Adresse Kundenservice:
kundenservice@novonordisk.com
Internet-Adresse: www.novonordisk.at



Injizieren Ihrer Dosis

Stellen Sie sicher, dass Sie die vollständige Dosis injizieren, indem Sie die richtige Injektionstechnik anwenden.

M Halten Sie PenMate® gegen Ihre Haut. Drücken Sie den Dosisknopf bis Sie ein Klicken hören und die Injektionsnadel automatisch eingestochen wird.



N Um zu injizieren, drücken Sie den Injektionsknopf so lange, bis die Zahl 0 an der Markierung in der Dosisanzeige steht. Während Sie dies tun, können Sie womöglich einen Klick hören oder fühlen.



Lassen Sie die Nadel für mindestens **6 Sekunden** unter der Haut, um sicherzustellen, dass Sie die vollständige Dosis injizieren. Während Sie warten, können Sie den Injektionsknopf loslassen.

⚠ Drücken Sie niemals den Injektionsknopf, bevor Sie bereit sind, Ihre Dosis zu injizieren. Sie könnten sich versehentlich selbst mit der Nadel stechen.


⚠ Drehen Sie niemals den Dosisinstellung während Sie Ihren PenMate® aktivieren, da Sie dadurch eine falsche Dosis injizieren könnten.

⚠ Verwenden Sie niemals die Anzahl der Klicks, um zu zählen, wie viel mg Sie injizieren. Die exakte mg-Menge wird nur an der Markierung in der Dosisanzeige angezeigt.


⚠ Während Sie injizieren, dürfen Sie die Dosisanzeige niemals berühren, da dies die Injektion blockieren kann.

O Ziehen Sie die Nadel aus der Haut.


Danach sehen Sie vielleicht einen Tropfen Wachstumshormon an der Nadelspitze. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Dosis, die Sie gerade erhalten haben.

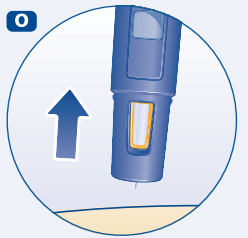

P Setzen Sie die äußere Nadelkappe vorsichtig wieder auf, ohne die Nadel zu berühren. Schrauben Sie die Nadel ab und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß entsprechend den Anweisungen Ihres Arztes, des medizinischen Fachpersonals oder Ihrer nationalen Behörde.

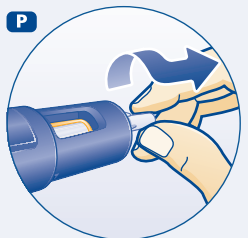

Q Setzen Sie die PenMate® Kappe nach jedem Gebrauch wieder auf. Falls Wachstumshormon direktem Licht ausgesetzt wird, kann seine Wirkung vermindert sein.

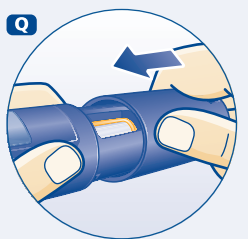

⚠ Setzen Sie die innere Nadelkappe niemals wieder auf, sobald Sie sie von der Nadel gezogen haben. Sie könnten sich versehentlich selbst mit der Nadel stechen.


⚠ Bewahren Sie den Pen immer ohne aufgeschraubte Nadel im PenMate® auf. Dies reduziert das Risiko von Verunreinigungen, Infektionen, Auslaufen von Wachstumshormon, blockierten Nadeln und ungenauer Dosierung.

⚠ Falls Sie Ihre PenMate® Kappe verlieren, kontaktieren Sie Ihre Bezugsquelle, um eine neue zu bekommen. Bis Sie eine neue PenMate® Kappe bekommen, können Sie Ihren Wachstumshormon-Pen mit Penkappe auch ohne Ihren PenMate® verwenden oder Sie können Ihren PenMate® mit dem aufgesetzten Pen verwenden und diese vor direktem Licht geschützt aufbewahren.


Austauschen eines leeren Pens

Verwenden Sie Ihren PenMate® wieder, indem Sie einfach Ihren Pen austauschen, wenn er leer ist.

R Wenn Ihr Pen leer ist, drehen Sie ihn und ziehen ihn behutsam aus Ihrem PenMate® heraus.

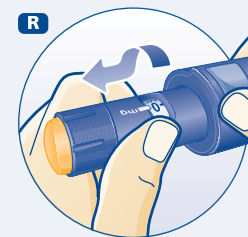


Entsorgen Sie den leeren Pen ohne aufgeschraubte Nadel entsprechend den Anweisungen Ihres Arztes oder medizinischen Fachpersonals oder Ihrer nationalen Behörden.

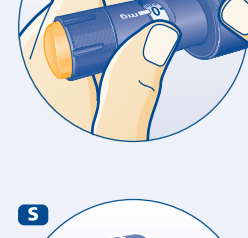

S Setzen Sie einen neuen Pen in den PenMate® ein und drehen Sie den Pen bis Sie ein Klicken hören oder fühlen.



Die Dosisanzeige des Pens wird auf gleicher Höhe mit dem Dosisknopf an Ihrem PenMate® sein.

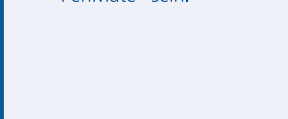

⚠ Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr PenMate® nicht bereits aktiviert worden ist, bevor Sie einen leeren Pen ersetzen.

Was zu tun ist, wenn Ihr Pen fast leer ist

Wie viel Wachstumshormon ist noch übrig?

Sie können die Wachstumshormonskala auf Ihrem Norditropin® FlexPro® oder Sogroya® Pen verwenden, um zu sehen, wie viel Wachstumshormon sich ungefähr noch im Pen befindet. Sie können den Dosisinstellung verwenden, um genau zu sehen, wie viel Wachstumshormon sich noch im Pen befindet – wenn der Pen weniger als 2,0; 4,0 oder 8,0 mg enthält, je nachdem, welchen Pen Sie verwenden:

Drehen Sie den Dosisinstellung, bis er stoppt. Die Zahl, die nun an der Markierung angezeigt wird, gibt an, wie viel mg noch vorhanden sind.

Wenn Sie mehr Wachstumshormon benötigen, als Sie in Ihrem Pen übrig haben, können Sie einen neuen Pen verwenden oder die Dosis zwischen Ihrem derzeitigen Pen und einem neuen Pen aufteilen.

Pflege Ihres PenMate® und Norditropin® FlexPro® oder Sogroya® Pen

Behandeln Sie Ihren PenMate® und Norditropin® FlexPro® oder Sogroya® Pen mit Sorgfalt:

Aufbewahrung und Handhabung

- Lassen Sie Ihren PenMate® oder Pen nicht fallen und stoßen Sie sie nicht gegen harte Oberflächen. Falls Sie sie fallen gelassen haben oder vermuten, dass etwas mit ihnen nicht stimmt, schrauben Sie immer eine neue Einweg-Injektionsnadel auf den Pen und überprüfen Sie den Wachstumshormonfluss, bevor Sie injizieren.
- Versuchen Sie nicht, den Pen nachzufüllen – er ist vorgefüllt.
- Versuchen Sie nicht, den PenMate® oder Pen zu reparieren oder ihn auseinander zu nehmen.
- Setzen Sie den PenMate® oder Pen nicht Staub, Schmutz, Flüssigkeiten, direktem Licht oder extremen Temperaturen aus.
- Wenn Ihr Norditropin® FlexPro® oder Sogroya® Pen im PenMate® eingesetzt ist, bewahren Sie ihn so auf wie in der Packungsbeilage Ihrer Norditropin® FlexPro® oder Sogroya® Packung beschrieben.
- Bewahren Sie Ihren PenMate® und Norditropin® FlexPro® oder Sogroya® Pen immer in der mitgelieferten Box auf, wenn diese nicht in Gebrauch sind. Die zu erwartende Lebensdauer Ihres PenMate® beträgt 5 Jahre bei ordnungsgemäßem Gebrauch.
- Die Box bietet außerdem Platz für vier zusätzliche NovoFine® oder NovoTwist® Einweg-Injektionsnadeln.

Reinigung und Wartung

- Versuchen Sie nicht, den PenMate® oder Pen zu waschen, in Flüssigkeit einzuweichen oder mit einem Schmiermittel zu behandeln. Falls erforderlich, reinigen Sie sie mit einem auf ein feuchtes Tuch aufgetragenen milden Reinigungsmittel.
- Reiben Sie Verunreinigungen und Staub mit einer trockenen, weichen Bürste ab.

Entsorgung

- Wenn Sie Ihren PenMate® entsorgen, beachten Sie bitte die Vorschriften Ihrer nationalen Behörden.

PenMate® enthält keine umweltschädlichen Substanzen.


Garantie

- PenMate® darf nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für jegliche Probleme mit PenMate®, wenn diese Bedienungsanleitung nicht beachtet wurde.

Novo Nordisk ersetzt einen fehlerhaften PenMate® oder eine mangelhafte Box, wenn Sie ihn/sie innerhalb von 5 Jahren nach Kaufdatum bei Ihrer zuständigen Bezugsquelle zur Inspektion zurückgeben und die Originalrechnung Ihres PenMate® beifügen.

Wenn Sie die Chargennummer Ihres PenMate® benötigen, finden Sie diese wie in der Abbildung des FlexPro® PenMate® in dieser Gebrauchsanweisung, direkt nach der Einleitung, gezeigt.

Für Kunden in der Europäischen Union: Falls Ihr Arzt und/oder Sie denken, Sie hatten ein schwerwiegendes Vorkommnis durch die Benutzung des PenMate®, stellen Sie sicher, dass dieses an Novo Nordisk und an Ihre nationale Behörde gemeldet wird.

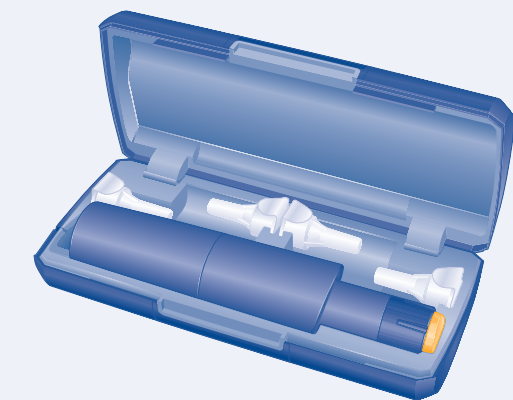

FlexPro® PenMate®

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren FlexPro® PenMate® verwenden.

