

## novofine® Autocover® 30G

0,3x8 mm

### Introduzione

Legga attentamente questo foglio illustrativo prima di usare NovoFine® Autocover® anche se ha già usato gli aghi NovoFine®.

Non usare l'ago senza un'adeguata formazione da parte del medico.

NovoFine® Autocover® è un ago sterile per iniezione con un meccanismo automatico di sicurezza che riduce il rischio di punture accidentali. Il sistema di protezione di NovoFine® Autocover® nasconde l'ago dalla vista durante l'uso. Il meccanismo di sicurezza indica che l'ago è già stato usato. L'ago è sterile se il sigillo protettivo e il cappuccio dell'ago sono integri. Gli aghi sono esclusivamente MONOUSO.

L'uso di NovoFine® Autocover® è sconsigliato ai non vedenti ed agli ipovedenti senza l'assistenza di un normovedente addestrato all'uso.

### ⚠ Informazioni importanti


Prestare particolare attenzione a queste note, poiché sono importanti per un uso sicuro dell'ago.

⚠ Tenga le parti piccole lontano dalla portata dei bambini.




### 1 Attacco di NovoFine® Autocover®

- Prenda un nuovo ago NovoFine® Autocover®.
- Controlli il sigillo protettivo e il cappuccio dell'ago per danneggiamenti che possono influire sulla sterilità. Se si riscontrano danni, utilizzi un nuovo NovoFine® Autocover®.
- Rimuova il sigillo protettivo.
- Spinga l'ago perpendicolarmente sulla penna. Lo ruoti finché risulta saldo.

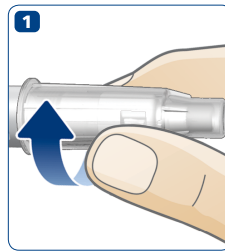

### 2 Rimozione del cappuccio dell'ago

- Sfilì il cappuccio dell'ago e lo conservi per dopo.

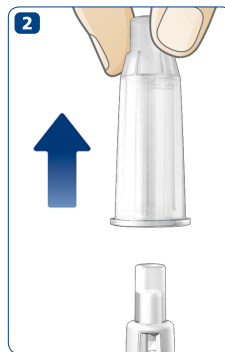

### 3 Controllo del flusso (preparazione)

Controlli il flusso nel dispositivo di somministrazione. Ciò è utile per assicurare la somministrazione dell'intera dose. Segua la procedura descritta nel foglio illustrativo del dispositivo di somministrazione.



⚠ Prima dell'iniezione, verifichi che l'ago non sia bloccato: se l'indicatore di bloccaggio è rosso, l'ago non può essere utilizzato (vedere punto 5). Rimuova l'ago (vedere punto 6) e ne inserisca uno nuovo.

### 4 Iniezione


- Selezioni la dose seguendo le indicazioni del foglio illustrativo del dispositivo di somministrazione.
- Inserisca l'ago nella cute adottando la tecnica di iniezione illustrata dall'operatore sanitario. Per garantire una maggiore superficie stabile del sito di iniezione, è possibile utilizzare una plica.
- Inietti il medicinale seguendo le indicazioni del foglio illustrativo del dispositivo di somministrazione. **Tenga premuto NovoFine® Autocover® nella cute** come mostrato nella figura 4 per assicurarsi che l'ago rimanga completamente inserito durante l'iniezione.
- Tenga l'ago completamente inserito e **conti lentamente fino a 6**. Ciò serve ad assicurarsi di ricevere la dose completa.
- Estragga l'ago dalla cute. Sulla cute possono comparire alcune gocce di medicinale. Si tratta del medicinale che è rimasto all'interno del sistema di protezione durante la verifica del flusso. Ciò non ha effetto sulla dose somministrata.



⚠ Tenga l'ago completamente inserito durante l'iniezione per assicurarsi di assumere la dose completa. **Per le persone che usano l'insulina:** se la dose completa non è stata somministrata, ciò può determinare livelli elevati di zucchero nel sangue.


### 5 Meccanismo di sicurezza

Quando l'ago viene estratto dalla cute, il meccanismo di sicurezza è attivato e l'indicatore di bloccaggio ruota verso il rosso. L'indicatore rosso di bloccaggio conferma che l'ago è bloccato e non può essere riutilizzato. L'indicatore rosso di bloccaggio **non serve a confermare** che la dose è stata somministrata.

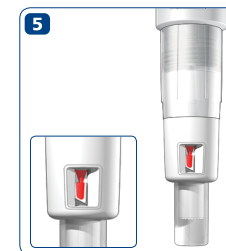

### 6 Rimozione dell'ago

- Dopo l'iniezione, riposizioni il cappuccio sull'ago e sviti l'ago.
- Lo getti in modo sicuro secondo le istruzioni dell'operatore sanitario.

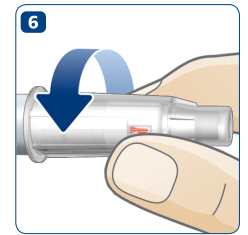

Può essere usato con: FlexPen®, FlexTouch®, InnoLet®, NovoPen®, NovoPen Echo®, Ozempic®, Saxenda®, Victoza®, Xultophy® (di Novo Nordisk A/S), FlexPro®, Norditropin NordiFlex®, NordiPen® (di Novo Nordisk Health Care AG), Autopen®, BerliPen®, Byetta®, KlikSTAR®, HumaPen®, KwikPen®, SoloSTAR®, TactiPen® (dei rispettivi proprietari).

NovoFine® e Autocover® sono marchi registrati di proprietà di Novo Nordisk A/S, Danimarca.

Per i clienti dell'Unione europea: se il medico e/o voi ritenete che si sia verificato un incidente grave causato dall'uso di NovoFine® Autocover®, assicurarsi di segnalarlo a Novo Nordisk e alle proprie autorità nazionali.

Data di emissione: 2019-05



0123 novonordisk.com  
© 2019  
Novo Nordisk A/S  
Novo Allé,

DK-2880 Bagsværd, Danimarca

